

POIGNET

TURTLEBRACE.CO



CARACTÉRISTIQUES

- Moulage direct sur le membre
- Tissu antibactérien
- Ambidextre, il est équipé d'une fermeture Velcro ou d'une fermeture éclair
- Radio-transparent
- Submersible et auto-drainant
- Remoulable sans limites ni dégradation
- Épaisseur de 3,2 mm permettant un pansement normal
- Plastique compostable et écologique

MODÈLES

PÉDIATRIQUE

Moyen (10.4cm - 16.6cm)
Grand (12.8cm - 20.5cm)

VELCRO

TBPPV-02
TBPPV-03

FERMETURE ÉCLAIR

TBPPZ-02
TBPPZ-03

ADULTE


Petit (15.2cm - 24.3cm)
Moyen (17.6cm - 28.2cm)
Grand (20cm - 32cm)

VELCRO

TBPAV-01
TBPAV-02
TBPAV-03

FERMETURE ÉCLAIR

TBPAZ-01
TBPAZ-02
TBPAZ-03

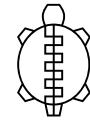

**TURTLE
BRACE**

POIGNET

INSTRUCTIONS DE MOULAGE

#1 Chauffez l'attelle entre 67°C et 108°C (152°F et 225°F) jusqu'à ce qu'elle devienne souple et élastique. Le plastique doit avoir une consistance pâteuse lorsqu'il est pincé entre deux doigts.

#2 Une fois que l'attelle est devenue souple et élastique, vous pouvez la draper sur le corps. Assurez-vous que la température de l'attelle n'est pas trop chaude pour être confortable ou risquer de brûler votre patient. Un petit coussin, d'environ 3 mm (1/8"), peut être placé à l'apex osseux et retiré après le moulage.

#3 Placez votre patient dans la position désirée et attendez que l'attelle durcisse. Pour éviter le plissement de la fermeture éclair, maintenez une tension sur le côté supérieur de la fermeture éclair, ou sur les deux côtés.

Méthode de chaleur sèche.

Placez l'attelle dans le sac chauffant Turtlebrace, un four traditionnel ou un four à convection. Si vous utilisez un four traditionnel ou à convection, préchauffez-le à 102 °C (215 °F) avant de chauffer l'attelle.

Méthode à l'eau chaude.

Placez l'attelle dans un hydrocollateur ou une cuve chauffante à eau chaude, entre 67°C et 100°C (152°F et 212°F). Si vous utilisez une cuve à eau chaude, assurez-vous que l'attelle ne touche pas le fond, car la température du fond peut dépasser 108°C (225°F).

POIGNET



**TURTLE
BRACE**

RECOMMANDATIONS/PRÉCAUTIONS

- Le moulage doit être effectué uniquement par un professionnel de la santé ou une personne formée à l'orthopédie, au moulage ou à des dispositifs médicaux similaires.
- Ceci est un produit à usage unique, il ne peut pas être transféré, même s'il a été soigneusement lavé.
- N'utilisez pas de pistolet thermique car cela pourrait endommager l'orthèse.
- Ne drapiez pas l'orthèse si elle est trop chaude pour éviter les brûlures de la peau ou l'inconfort.
- Il est recommandé de vérifier fréquemment la circulation sanguine. Si l'orthèse devient trop serrée, conseillez au patient de la dézipper, de l'assouplir ou de l'enlever, si possible, et de consulter son professionnel de santé.
- Il est recommandé de vérifier fréquemment l'état de la peau. Si des signes de macération, d'irritation (rougeur), d'éruptions cutanées ou d'autres problèmes de peau apparaissent, conseillez au patient d'enlever l'orthèse (si possible) et de consulter immédiatement son professionnel de santé.
- Ne chauffez pas l'orthèse à plus de 108°C (225°F), car le tissu ou la fermeture éclair risquent de se brûler ou de fondre.
- Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où l'utilisateur et/ou le patient est établi.